

痛い指の関節に

曲げると痛い指関節に巻くテープ

防水構造・強粘着で、曲げると痛い指関節に
巻いていただくテープ。

適度な伸縮がある130デニール相当の丈夫な布製で
しっかり固定するテープです。

こんなお悩みの方に

- 曲げると指の関節が痛い
- サポーターだと水仕事時に濡れて困る
- はがれにくいテープを探している
- その日の状態に合わせて、固定力を変えたい




<使用上の注意>

- 本品の粘着力は非常に強くなっています。
ご使用になる際は、部位や頻度などに十分お気をつけください。
- 皮膚の負担を軽減するため、長時間貼ったままにせず、1日1回は貼り替えてください
- 表面は濡れますが、中にはしみとおりません。表面の濡れも軽くタオルで押さえていただくと比較的早く乾きます。
- 使用中または使用後に発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には直ちに使用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。
- 傷口や皮膚炎等がある場合、直接貼付することは避けてください。
- この製品は天然ゴムを使用しています。
- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 使用後はがす際は、皮ふを傷めないように静かにゆっくりとはがしてください。
- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

基本の貼り方

01


剥離紙をはがし、固定したい指の関節にあてる。

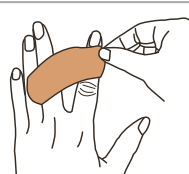

02

強く締め付けないように巻きつける。


※テープを引っ張れば引っ張るほど固定力は増しますが、その分締め付けにより肌などへの負担も増加します。十分ご注意の上ご使用ください。

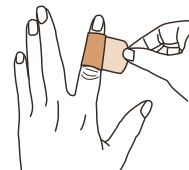

03

巻き終わりを手の甲側にすると、はがれにくくなります。

※巻き終わりが手の平側になると、こすれてめくれやすくなります。

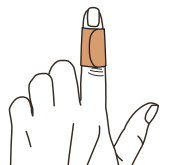

テープの剥がし方

本品の粘着力は非常に強くなっています。使用後はがす際は、下記の手順に沿って皮ふを傷めないように静かにゆっくりとはがしてください。


01

引っ張らずにゆっくりと指に沿ってはがしてください。



02

のり跡が残りましたら、はがしたテープの粘着面で軽くこするようにしていただくと、比較的きれいに取れます。

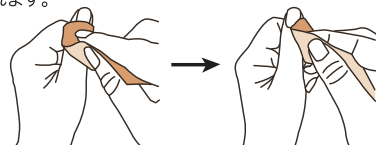


複数枚を組み合わせたり、貼り方を変えることで、お客様の状態にあわせて固定力を調節できます。

詳細は裏面をご覧ください

お客様の状態にあわせて 固定力を調節できます。

貼り方を変えると、さらに固定力がアップします！

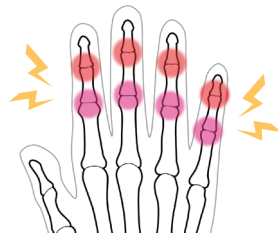

貼り方の動画は
こちら→



貼り方のアレンジ方法

【アレンジ1】

基本の貼り方よりも、
固定力を上げたい方

※第一関節、第二関節の
痛み共通の貼り方



01 剥離紙を剥がし、爪の下にテープの端を合わせ、指の付け根に向かって貼ります。

02 2枚目を第一関節に巻きつけます。

03 3枚目を縦に貼ったテープの端に合わせて横に巻きつけます。

さらに強く固定したい方

4枚目を第二関節に巻き付ける

【アレンジ2】

ねじり方向にも固定し、アレンジ1よりもさらに固定力を上げたい方

※第一関節、第二関節の
痛み共通の貼り方



01 剥離紙を剥がし、爪の下にテープの端を合わせ、指の付け根に向かって貼ります。

02 2枚使い、爪側からエックスにはる

03 アレンジ1の2・3と同じように上下をはる。

【アレンジ3】

関節部に貼るのも
痛いという方におす
めの貼り方

第一関節が痛い場合

第一関節をよけて貼る

第二関節が痛い場合

第二関節をよけて貼る

第二関節の上下各1枚を横巻した状態

さらに強く固定したい方

6枚目を第二関節に巻き付ける

製造販売元

日廣薬品株式会社

所在地：東京都世田谷区北沢4-15-1

お問合せは お電話、もしくはHPのお問合せページをご利用ください。

日廣薬品株式会社 (nikkoban.jp) TEL.03-3468-1311

